


Souprava pro testování antigenu 2019-nCoV

(Imunochromatografie z koloidního zlata)

NOVÁ STUDIE

Senzitivita 95,06 % (až 98,54 % při Ct≤25)
Specifita 99,62%

- 1 Šetrný výtěr z přední části nosu
- 2 Neinvazivní
- 3 Jednoduché použití
- 4 Praktický, **není potřeba přístroj**
- 5 Rychlý, **výsledek za 15 minut**
- 6 Stabilní, s vysokou přesností
(O spolehlivosti testu se můžete přesvědčit přímo z rozsáhlé studie, kterou naleznete www.quickseal.eu)
- 7 Testy splňují všechny podmínky, které ZP požaduje
- 8 Test proplácen zdravotní pojišťovnou

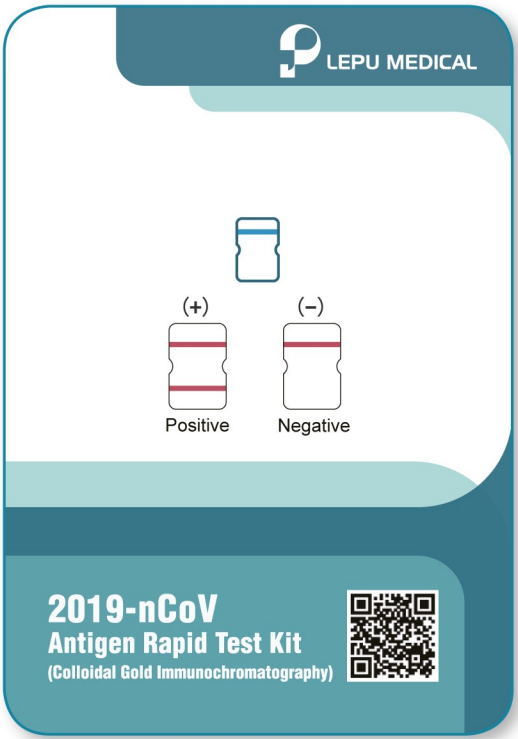

Souprava je určena ke kvalitativní detekci antigenu 2019-nCoV v klinickém vzorku. Testovací kazeta je založena na specifické reakci protilátka-antigen a technologii imunoanalýzy.

WHO doporučuje imunotesty k detekci antigenu v diagnostice infekce 2019-nCoV.

Vzorek	Výsledek	Balení
výtěr z nosu	za 15 min.	25 ks



Nemocnice



Odběrová místa



Letiště



Doprava



Hotel




Společnosti




Hromadný screening




Návod k použití

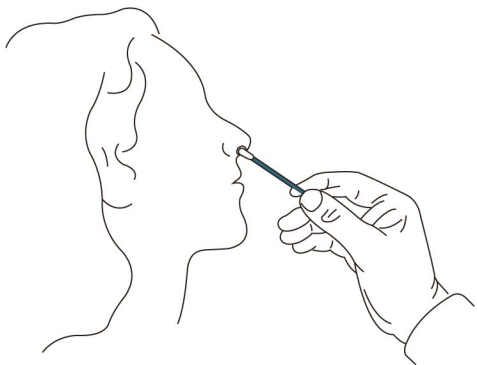


Krok 1: Odeberte vzorek pomocí výtěrové tyčinky

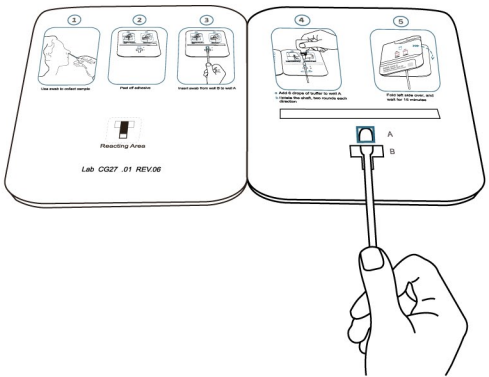

Krok 3: Tyčinku dvakrát otočte ve směru a proti směru hodinových ručiček.

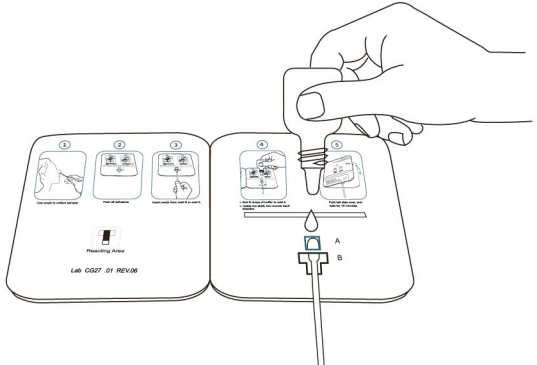

Krok 2: Protáhněte výtěrovou tyčinku se vzorkem jamkou B do jamky A a přidejte 6 kapek pufru do jamky A.

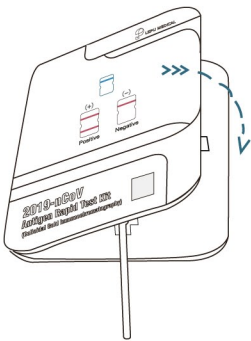


Krok 4: Odstraňte ochranný kryt fixačního lepidla. Slepte levou a pravou stranu k sobě a vyčkejte 15 minut.




Interpretace výsledku

Pozitivní (+)

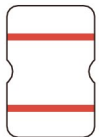

Negativní (-)

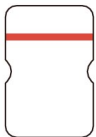

Neplatný

